

Gyógylézer Család Kft.

orvosi lézerkészülék gyártása és forgalmazása,
javítás, felülvizsgálat

☐ 1117 Budapest, Budafoki út 183.

☎ 06-1/203-0001; (+36) 70/679/8810

ugyfelszolgalat@gyogylezer.hu
www.gyogylezer.hu; www.softlaser.hu

Cg.01-09-995213

3 IN 1 KÉZI LÁGYLÉZER KÉSZLET

- ❖ OPTIKOP COMBI 150200 kézi lágylézer készülék
- ❖ 3 féle masszázsfaj
- ❖ 2 db védőszemüveg

A készlet ára: Bruttó 1. 605 000.-Ft

A lágylézer-kezelés bármely kozmetikai protokollba beépíthető!

3 in 1 KÉZI LÁGYLÉZER KÉSZLET részei:



Kombinált fényű, kis méretű mobil eszköz,
amely egy kézításkában is elfér!

- ❖ Az Optikop Combi készülékkel tulajdonképpen 3 féle kezelést végezhetünk: egy piros-, egy infra- és egy kombináltan, piros és infra fényrel egyszerre működő lézert használva.
- ❖ Alkalmas felszíni és mélyebb szövetek külön-külön, vagy egyszerre történő kezeléséhez.
- ❖ A két nyomógommbal ellátott, egyszerű kezelőfelület, praktikussá és könnyen kezelhetővé teszi az Optikop Combi készüléket.
- ❖ A készülék 3 darab AAA típusú elemmel, akkumulátorral, vagy hálózati adapterrel (opcionális) működtethető.

1. OPTIKOP COMBI 150200 : piros és infra lágylézerfényt sugárzó kombinált kézi készülék

A piros lágylézerfény a hám-irha szöveteiben fejt ki hatását:

- ❖ Sejtmegújító hatású, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagéntermelést
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat, szöveti pangásokat, ödémákat

Használata javasolt: szeporreás-, aknés-, fényt veszített, fáradt, öregedő bőrre, szarkalábak-, ráncok simítására, a bőr életerejének fokozására, szem alatti sötét karikák kezelésére, gyulladáscsökkentésre, kozmetikai tisztító kezelés nyomainak gyorsabb regenerálására, aknék nyomában keletkező hegek megakadályozására és gyógyítására, baleseti-, műtéti seb- és hegkezelésre.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: pl. 2 J leadása 15 másodperc

Közei infra láglézerfény hám-irha-bőralja szöveteiben fejt ki hatását:

- ❖ Sejtmegújító hatású, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagéntermelést, feszesítő hatású
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat
- ❖ Javítja (regenerálja) az izmok állapotát
- ❖ Segíti a hatóanyagok bejutását a mélyebb szövetekbe

Használata javasolt: Face-lifting, Anti-Aging, stria kezelésére, megereszkedett, rugalmasságát veszített, heges bőrre; mély, betört ráncok simítására, gyulladás csökkentésére. Aknék nyomában keletkező hegek kialakulásának megakadályozására és gyógyítására, baleseti-, műtéti seb- és heg kezelésre.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: pl. 2 J leadása 11 másodperc

Piros + közei infra láglézerfény egyidejű használatának hatásai összeadódnak:

A felszíni és a mélyebb szövetek egyszerre kezelhetőek, a teljesítmények összeadódnak, így lerövidül a kezelési idő, szinergikus hatása miatt még látványosabb eredményt érhetünk el!


Használata javasolt: Optikop Beautylaser „AllAges” quick-lifting kezeléshez. Kisebb területeken pontszerű alkalmazás javasolt, masszázsfejel kiegészítve nagyobb felületeket kezelhetünk. Tónusát-, rugalmasságát veszített bőr esetén ráncsimító, feszesítő, segíti a hatóanyagok könnyebb felszívódását. Szekorreaás, aknés, heges bőrfelületnél sejtregeneráló, sejtmeújító, kollagéntermelést stimuláló, gyulladáscsökkentő hatású.

Tájékoztató jellegű kezelési idő, kombinált működés mellett: pl. 2 Joule (J) leadása 6 másodperc; Egész arc kezelése 10-15 percet vesz igénybe.

2. Masszázsfej csomag:

- ❖ **Nyak- és dekoltázskezelő (a) + arc- és ránckezelő masszázsfjek (b) + 1 adapter:** a két különböző méretnek köszönhetően a nagyobb és a kisebb felületek is elérhetővé válnak, így a dekoltázs és nyak, valamint az arc és homlok területei is kényelmesen kezelhetők, a kontakt, masszázsjellegű kezelés fokozza a vendég-élményt!

- ❖ **Szembránc kezelő (c):** ezzel az optikai feltétellel a szemkörnyéki ráncok, szarkalábak láglézer-kezelése válik könnyen kivitelezhetővé.

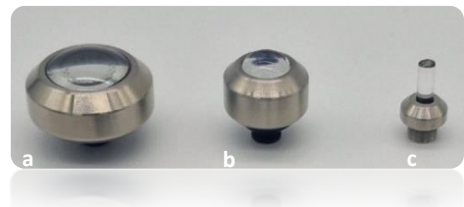

3. Védőeszközök:



- ❖ Szemüvegre is felhelyezhető védőszemüveg a **kezelő részére**: piros és infra fényhez
- ❖ Szemvédő arckezeléshez, a **vendég részére**



4. További tartozékok:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ❖ 1 db „Láglézer terápia” szakkönyv | ❖ 1 db hord-táska |
| ❖ 1 db csatolókép | ❖ 1 db figyelmeztető címke |
| ❖ 1 db száloptika | ❖ 1 db kezelési utasítás |
| ❖ 1 db kontakt feltét | ❖ 1 db adapter |

ÜZLETI ELŐNYÖK

- ❖ gyorsan megtérülő beruházás (4-6 hónap alatt)
- ❖ nincs fenntartási költség
- ❖ marketing támogatás adunk
- ❖ 24 hónap garancia
- ❖ részletfizetési lehetőség

SZAKMAI TÁMOGATÁS

- ❖ ingyenes készülékbemutató
- ❖ komplex képzési rendszer
- ❖ folyamatos továbbképzések
- ❖ ingyenes rendszeres konzultáció
- ❖ hazai gyártó, elérhető szervíz szolgáltatás

Vegyél részt képzéseinken, légy részese az OPTIKOP Beautylaser közösségnek!

www.beautylaser.hu