

Gyógylézer Család Kft.

orvosi lézerekészülék gyártása és forgalmazása, javítás, felülvizsgálat

1117 Budapest, Budafoki út 183.

06-1/203-0001; (+36) 70/679/8810

ugyfelszolgalat@gyogylezer.hu

www.gyogylezer.hu; www.softlaser.hu

Cg.01-09-995213

KLASSZIKUS ALAPTELJESÍTMÉNYŰ ASZTALI KÉSZLET

- OPTIKOP BEAUTY CLASSIC 100V-50BL-900LZ Asztali Lágylézer Vezérlőegység
- 3 különböző lágylézer kezelőfej
- 3 féle masszázsfaj
- 2 db védőszemüveg

A készlet ára: Bruttó 2.665.000.-Ft

A lágylézer-kezelés bármely kozmetikai protokollba beépíthető!

A KLASSZIKUS ALAPTELJESÍTMÉNYŰ ASZTALI KÉSZLET részei:

1. Optikop Beauty Classic vezérlő és tápegység

- ❖ Egyszerűen kezelhető, tekerőgombos asztali vezérlőegység.
- ❖ A vezérlőegységhez összesen három különböző kezelőfej csatlakoztatható: egy piros és egy ibolya pontkezelőfej, valamint egy lézerzuhany.
- ❖ A dózis kiválasztása után (ami lehet 2,4,6,8,10 és végtelen Joule) a készülék automatikusan beállítja a kezelési időt és jelzi annak múlását.
- ❖ A készülék biztonságos használatát az integrált teljesítményellenőrzés és a kezelőfejek hőmérséklet-figyelése garantálja, ennek következtében működése stabil és megbízható.
- ❖ Akupunktúrás kezeléshez 7 féle Moduláció kiválasztásra van lehetőség.

Az „ÖRÖK KLASSZIKUS” OPTIKOP asztali lágylézer kezelőrendszer, könnyen átlátható kezelőfelülettel!

Vezérlő egy, kettő, három kezelőfejhez

1



2



Piros kezelőfej
(dióda: 100 mW)

3



Ibolya kezelőfej
(dióda: 50 mW)

4



Infra lézerzuhany
(6 dióda: 900 mW)

2. Optikop Beauty Classic F 100V: piros láglézerfényt sugárzó kezelőfej**A piros láglézerfény a hám-irha szöveteiben fejt ki hatását:**

- ❖ Sejtmegújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagéntermelést
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat, szöveti pangásokat, ödémákat

Használata javasolt: szeborreás-, aknés-, fényét vesztett, fáradt-, öregedő bőrre, szarkalábak-, ráncok simítására, bőr életerejének fokozására, szem alatti sötét karikák kezelésére, gyulladáscsökkentésre, kozmetikai tisztító kezelés nyomainak gyorsabb regenerálására, aknék nyomában keletkező hegek kialakulásának megakadályozására és gyógyítására, baleseti-, műtéti seb- és heg kezelésre.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: pl. 2 Joule (J) leadása 22 másodperc

3. Optikop Beauty Classic F-50BL: ibolya láglézerfényt sugárzó kezelőfej**Ibolya láglézerfény a hám rétegében fejt ki hatásait:**

- ❖ Cutibacterium acne (korábban: propioni bacterium acne) számának csökkentése
- ❖ Faggyútermelés szabályozása, szaruképzés normalizálása

Használata javasolt: akne, gyulladt comedók, szeborreás bőr, Optikop Beautylaser Balancing kezelés

Tájékoztató jellegű kezelési idő: pl. 2 J leadása 44 másodperc

4. Optikop Beauty Lézerzuhany 900 IR: infra láglézerfényt sugárzó, 10 cm² felületet lefedő lézerzuhany**Infra lézerzuhany a hám-irha-bőralja szöveteiben fejt ki hatását:**

- ❖ Azonnal látható Face-Lifting hatás!
- ❖ Sejtmegújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagéntermelést, feszesítő hatású
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat
- ❖ Javítja (regenerálja) az izmok állapotát, segíti a hatóanyagok bejutását a mélyebb szövetekbe

Használata javasolt: Optikop Beautylaser SlowAging kezeléshez.

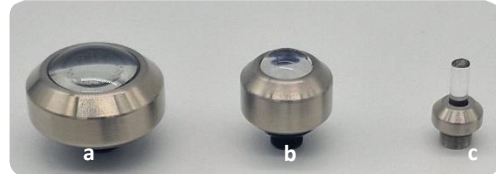
Face-lifting, Anti-Aging, kezeléshez, megereszkedett, rugalmasságát vesztett, heges bőrre. Nagyobb felületek, nyak és dekoltázs kezelésére, mélyebben fekvő izmok, izomcsoportok kezelésére.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: arc és dekoltázs kezelése kb. 30-35 perc

5. Masszázsfej csomag:

- ❖ **Nyak- és dekoltázskezelő (a) + arc- és ránckezelő masszázsfajok (b) + 1 adapter:** a két különböző méretnek köszönhetően a nagyobb és a kisebb felületek is elérhetővé válnak, így a dekoltázs és nyak, valamint az arc, homlok területei is kényelmesen kezelhetők, a kontakt, masszázs-jellegű kezelés fokozza a vendég-élményt!

- ❖ **Szemránc kezelő (c):** ezzel az optikai feltéttel a szemkörnyéki ráncok, szarkalábak lágylézer-kezelése válik könnyen kivitelezhetővé.

**6. Védőeszközök:**

- ❖ Szemüvegre is helyezhető **triplán kombinált védőszemüveg a kezelő részére:** ibolya, piros és infra fényhez
- ❖ Szemvédő arckezeléshez, **a paciens részére**

**7. További tartozékok:**

- ❖ 1 db „Lágylézer terápia” szakkönyv
- ❖ 1 db csatolókép
- ❖ 1 db száloptika
- ❖ 1 db kontakt feltét
- ❖ 1 db távtartó lézerzuhanyhoz
- ❖ 1 db akne-kezelő feltét
- ❖ 1 db hord-táska
- ❖ 1 db figyelmeztető címke
- ❖ 1 db kezelési utasítás
- ❖ 1 db adapter
- ❖ 1 db tálca

ÜZLETI ELŐNYÖK

- ❖ gyorsan megtérülő beruházás
- ❖ nincs fenntartási költség
- ❖ marketing támogatás
- ❖ 24 hónap garancia
- ❖ részletfizetési lehetőség

SZAKMAI TÁMOGATÁS

- ❖ ingyenes készülékbemutató
- ❖ komplex képzési rendszer
- ❖ folyamatos továbbképzések
- ❖ ingyenes rendszeres konzultáció
- ❖ hazai gyártó, elérhető szervíz szolgáltatás

Vegyél részt képzéseinken, légy részese az OPTIKOP Beautylaser közösségnek!
www.beautylaser.hu